


 **iSept**[®]
by i-DENTIX

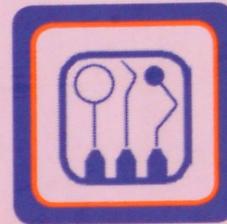

INSTRU+

Nettoyant Pré-Désinfectant pour instruments

CE 012

 utilisable avec les ultra-sons

 sans aldéhydes ni phénols

 protection ar

Application

INSTRU + est un nettoyant Pré-désinfectant concentré pour la désinfection et le nettoyage des instruments médicaux et dentaires (y compris les instruments de traitement radiculaire). La solution est exempte de phénols et d'aldéhydes, mais contient des inhibiteurs de corrosion. INSTRU + est biodégradable.

Spectre et Temps de contact

Action bactéricide:

selon VAH/ DGHM* (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis),

	1,0 %	5 Min
en présence de matières organiques		
	0,5 %	15 Min
en présence de matières organiques		

Activité virucide:

Inactivation HBV, HCV, HDV, HIV, Influenzae A,B,C (Grippe aviaire), Pockenvirus, Herpes, Varicella Zoster Virus, RSV, FSME-Virus et tous virus enveloppés.

	2,0%	5 Min
--	------	-------

Activité fongicide:

Selon VAH/ DGHM* (Candida albicans)

	1,0 %	5 Min
en présence de matières organiques		
	0,5 %	15 Min
en présence de matières organiques		

Activité tuberculocide:

Inactivation Tuberculose incl. Mycobakterium terrae selon VAH/DGHM *

	2 %	60 Min
en présence de matières organiques		

*Désinfection des instruments selon la Société Allemande d'Hygiène et de Microbiologie(VAH/DGHM)

Composition

Bis(amino-3propyl)dodécylamine, Didécylmethylpolyoxyethylammoniumpropionate, Tensioactifs nettoyants, agent complexant, Eau.

Mode d'emploi

INSTRU+ est une solution concentré qui doit être avec de l'eau avant utilisation. Immerger les instr dès la fin d'utilisation dans la solution diluée. Veill que les instruments soient totalement recouverts solution diluée. Laisser agir en respectant les terr d'action et les dosages.

Passer les instruments sous l'eau et sécher. Ne pas laisser les instruments dans la solution pl 12 heures.

Renouveler régulièrement la solution. Ne pas mélanger avec d'autres solutions désinfec

Instructions de sécurité

C Corrosif
R 22 Nocif en cas d'ingestion
R 34 Provoque des brûlures
R 42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalat
S 1/2 Ne pas laisser à portée des enfants
S 23 Ne pas respirer les vapeurs
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver imm et abondamment avec de l'eau et consulter un sp
S 28 En cas de contact avec la peau laver abond au savon et à l'eau
S 36/37/39 Porter gants, lunettes et une tenue ap
S 45 En cas d'accident ou de malaise, contacter médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
Ne se débarrasser de ce produit et de son emball prenant les précautions d'usage.

 **LOT**
voir impression

2015-01
A2071

i-dentix

22 quai Rouget de Lisle
67000 Strasbourg - France
tél: 00 33 (0)3 88 20 53 17
www.identix.fr