

[Imprimer](#) - [Annuler](#)



Les informations sont extraites des dossiers envoyés par les fournisseurs. Seuls les comptes rendus des essais de normes d'activité antimicrobienne ont fait l'objet d'une relecture critique selon des critères prédéfinis à partir des protocoles de normes.

# SEKUSEPT AKTIV

Créé le 31/10/2003 et remis à jour le 28/09/2012.  
Fiche validée par un expert depuis le 10/02/2004 .

**Usage(s) annoncé(s) par le fournisseur et retenu(s) par ProdHybase® :**

- Désinfectant par immersion pour DM

**Fournisseur(s) :**

- ECOLAB HEALTHCARE , Producteur Distributeur

**Classes des principes actifs :**

- COMPOSE INORGANIQUE LIBERATEUR D'OXYGENE ACTIF
- ALKYLAMINE
- TENSIOACTIF NON IONIQUE
- AGENT ANTICORROSION

**Indications :**

Désinfection des dispositifs médicaux, endoscopes. Utilisable en bac à ultrasons.

**Dilution :** 2 % (30 mL soit 20 g / L).

*Mise en garde : vérifier que la dilution et le temps de contact sont cohérents avec les résultats des normes d'application.*

**Commercialisé en secteur dentaire** (exclusivement ou non)

**pH :** 8,0 +/- 0,5 (produit dilué à 20 g / L).

**Commentaires :** - Durée de trempage = 15 min.  
- Durée de validité du bain = renouvellement quotidien minimum ou plus en fonction du résultat des bandelettes tests.

**Norme(s) de base :**

- NF EN 1040 / NF T 72-152 / bactéricidie / version 1997  
20°C - 1 min - 1%
- NF T 72-230 / 20°C / 60 min / sporicidie de base / 1988  
1 %

- NF EN 1275 / NF T 72-202 / fongicide (complète) / version 1997  
20°C - 15 min - 2 %

**Risque(s) :**

(directives 67/548/CEE et 1999/45/CE)

- Irritant peau
- Irritant yeux et muqueuses
- Nocif

**Protection individuelle :**

- Port de gants appropriés. Local adapté et ventilé. Couvrir les bacs.

**Présentation :**

Sachet 100 g. Seau 6 kg. A utiliser dans les 8 à 10 mois après ouverture du récipient.

---

[Imprimer](#) - [Annuler](#)